

# Bipolare Multifunktionspinzette

schnell · unblutig · sauber




Die bipolare Multifunktionspinzette gehört zum optionalen Zubehör und ist eine spezielle Entwicklung zur **Entfernung von Stielwarzen und Fibromata pendulantia**. Sie kann bei allen elektrochirurgischen Geräten mit bipolarer Funktion angeschlossen werden.

Bei der Entfernung der Fibroma Pendulans und den Stielwarzen bedarf es keiner Exzision und eine chirurgische Naht ist nicht mehr notwendig. Die Behandlung ist unblutig und es entstehen keine Narben.



Es bedarf keiner Betäubung der Hautoberfläche.

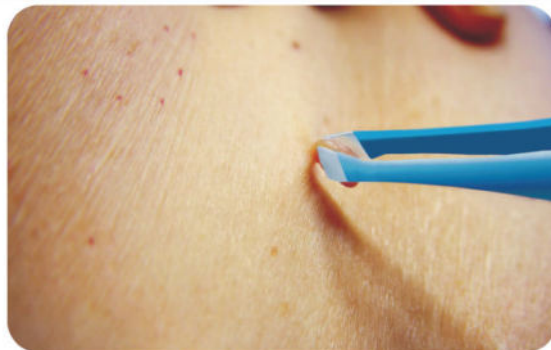

An der Basis wird das Fibroma Pendulans oder die Stielwarze mit der Pinzette erfasst und durch eine Impulsauslösung über den Fußschalter durch eine Koagulation von der Haut getrennt.



Direkt nach der Behandlung





Nach Ausheilung

Bei dieser einfachen und schnellen Methode kommt es zu keiner Nachblutung, da alle zuführenden Gefäße koagulierte werden. Durch die sofortige Koagulation während des Schneidens kann keine viralinfizierte Ausbreitung von Viren der Stielwarze oder des Fibroma Pendulans erfolgen.



# Bipolare Multifunktionspinzette

schnell · unblutig · sauber

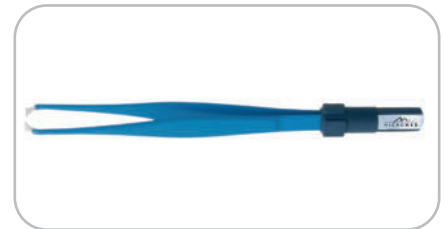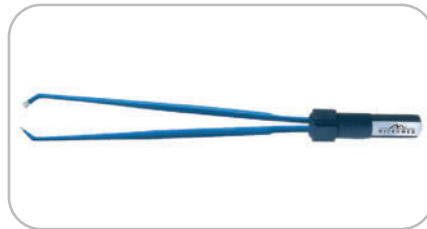

- Endseitig an den Griffteilen schließen Schnittflächen an, welche nach innen zueinander abgewinkelt sind. Somit erfolgt die Koagulation, der Schneidevorgang und die Entnahme gleichzeitig.
- Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die nach innen gebogenen Schnittflächen die Arbeitsgeschwindigkeit beschleunigt wird.
- Zudem ist eine Verletzungsgefahr im Vergleich zu einem Skalpell oder einer Elektrode für den Patienten und den Operateur wesentlich geringer.



Bipolare Multifunktionspinzette, innengewinkelt, Länge 130 mm, Breite 3 mm **Art.-Nr. 140-113-013**



Bipolare Multifunktionspinzette, innengewinkelt, Länge 130 mm, Breite 5 mm **Art.-Nr. 140-115-013**

